

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫХ
МАТРАСОВ
ANTIDECUBICTUSMATTRESS
Модели AT52101, AT52102**



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. **Примечание:** применение изделия должно полностью соответствовать этой инструкции, иначе продукт может быть поврежден. Проведите дезинфекцию, руководствуясь данной инструкцией.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Матрас противопролежневый предназначен для людей, которые проводят в лежачем положении более 15 часов в сутки. В таком режиме велика вероятность образования пролежней.

2. СТРУКТУРА И ПАРАМЕТРЫ

Матрас состоит из ячеек (AT52101), или баллонов (AT52102) стандартного размера, попеременно наполняемых воздухом.

Комплектность: Матрас противопролежневый – 1шт.; бактериостатическое покрывало (AT52102) – 1шт.; пластиковые трубки-воздухопроводы – 2шт.; компрессор – 1шт, ремкомплект - 1шт.;

Технические характеристики:

Матрас противопролежневый ячеистый	Матрас противопролежневый баллонный
- Размер матраса: 200X90X7см	- Размер матраса: 200X90X11,5см
- Вес матраса: 3,5кг	- Вес матраса: 5,4кг
- Максимальная нагрузка на матрас: 130кг	- Максимальная нагрузка на матрас: 145кг
- Параметры электросети: 220В/50Гц, 7Вт	- Параметры электросети: 220-240В/50Гц, 7Вт
- Объем потока воздуха: 7-8 л/мин	- Объем потока воздуха: 7-8 л/мин
- Длительность цикла: 6 мин.	- Длительность цикла: 6 мин.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Профилактический и лечебный массажные эффекты противопролежневого матраса достигаются за счет попеременного нагнетания воздуха в две не связанные друг с другом области матраса, каждая из которых состоит из отдельных камер. Чтобы шум воздушного потока не беспокоил пациента, компрессор должен устанавливаться у ног пациента. Для использования противопролежневого матраса в кровати, сделанной из жесткого материала необходимо постелить легкое одеяло под матрас. Сверху матраса рекомендуется использовать подстилку из легкого тканевого материала, пропускающего воздух. Нельзя допускать перегибов трубки, т.к. из-за этого может нарушиться воздушный поток.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ДО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА НА МАТРАСЕ, КОМПРЕССОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ

1. Распакуйте противопролежневый матрас.
2. Закрепите компрессор на спинке функциональной кровати (в ногах) или установите компрессор на стойкую к вибрациям горизонтальную поверхность рядом с кроватью пациента (со стороны ног).
3. Положите противопролежневый матрас на упругий матрас кровати, имеющий ровную горизонтальную поверхность, площадь которой не меньше рабочей площади матраса.
4. Свободное полотно противопролежневого матраса подверните под матрас кровати.
5. Подсоедините матрас к компрессору трубками-воздухопроводами. Убедитесь, что трубки не закручены и не проходят под матрасом.
6. Включите компрессор. Воздух начнет поступать в матрас.
7. Матрас полностью наполнится воздухом в течение 10-15 минут.
8. Застелите матрас простыней и уложите пациента. Тщательно расправьте складки простыни.
9. Отрегулируйте давление рекомендованное врачом.
10. Ежедневно контролируйте мощность нагнетания воздуха, при необходимости увеличивая или уменьшая ее с помощью регулятора давления.

Внимание!

Противопролежневый матрас предназначен для использования в круглосуточном режиме с включенным компрессором. Система циклично меняет давление в ячейках (баллонах), увеличивая давление в одной группе ячеек (баллонов) и одновременно уменьшая в другой. Цикл составляет 5-10 минут.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Внимание!

Прежде, чем перемещать или ремонтировать компрессор – отключите его от сети!

1. Матрас должен находиться на сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды.
2. Матрас протирают мягкой тканью, смоченной чистой холодной водой или мыльным раствором.
3. Просушивать матрас вдали от нагревательных приборов.

4. Беречь матрас от воздействия прямых солнечных лучей.
5. Матрас нельзя стирать, гладить и подвергать воздействию химических веществ.
6. Не используйте для очистки антикоррозийные, обезжиривающие чистящие средства или уксусные растворители.
7. При попадании мочи на поверхность матраса рекомендуется как можно быстрее очистить матрас от мочи.
8. Перед тем как мыть матрас его необходимо надуть. Дезинфицирующее средство не должно содержать красители. Используйте в качестве антисептика 75% спирт.
9. Температура окружающей среды при эксплуатации: 10-40 С.
10. Влажность воздуха при эксплуатации: 30-80%

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите матрас от воздействия колющих и режущих предметов.
2. Не погружайте матрас в воду.
3. Не подвергайте матрас воздействию высоких температур.
4. Не используйте матрас вблизи открытого огня.
5. Не курите вблизи работающей системы.
6. Оберегайте компрессор от ударов и падений.
7. Избегайте попадания жидкости на компрессор.
8. Отключите компрессор от сети во время использования взрывоопасных средств для наркоза.
9. Не пытайтесь разбирать и чинить компрессор самостоятельно.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Соблюдайте последовательность действий при подготовке матраса к хранению

1. Отключите компрессор от сети.
2. Продезинфицируйте поверхность матраса и дайте ей просохнуть.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений на соединительных трубках, вилке и шнуре компрессора.
4. Убедитесь, что в матрасе не осталось воздуха.
5. Аккуратно сложите матрас и упакуйте его в полиэтиленовый мешок.
6. Упакуйте компрессор и трубки-воздухопроводы.
7. Хранить в сухом, проветриваемом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, защищенном от резкого перепада температур на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
8. Температура хранения: от +5 до 40 градусов С.
9. Температура транспортировки: от -10 до 50 градусов С.
10. При транспортировке будьте осторожны: избегайте влажности и тряски.
11. Нарушение температурного режима приведет к повреждению пластика и увеличению риска разгерметизации матраса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

1. Противопролежневый матрас изготовлен из чистого нетоксичного поливинилхлорида, который поддается переработке и вторичному использованию.
2. Утилизация матраса сжиганием запрещена, в виду образования токсичных газов.
3. Утилизация компрессора осуществляется по правилам утилизации электроприборов, действующим на территории потребителя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43;

тел. 22 518 36 00; факс 22 518 36 30

E-mail: antar@antar.net

Импортер в Республике Беларусь:

ИООО «Анмедплюс»

220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, офис 318

Тел./факс: +375 17 278 50 23 (24)

E-mail: anmedplus@anmedplus.by